

Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

EMSAN®

HALS- UND RACHENSpray FAMILY

Medizinprodukt zum Einsprühen in Hals und Rachen

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
Sie haben sich für ein hochwertiges, bewährtes Medizinprodukt entschieden!

Es enthält:

Natürliches Quellsalz zur gezielten Anwendung auf der Hals- und Rachenschleimhaut.

Zusammensetzung:

100 ml Lösung enthalten: 1,175 g natürliches Quellsalz (isoton gelöst), gereinigtes Wasser.
Emsan® Hals- und Rachenspray Family ist garantiert frei von Konservierungsstoffen und ätherischen Ölen.

Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete:

Emsan® Hals- und Rachenspray Family wird zur Befeuchtung und Reinigung der Hals- und Rachenschleimhaut und dadurch zur Linderung bei Halsschmerzen, Hustenreiz und belegter Stimme angewendet. Die komplexe Mineralstoffzusammensetzung des natürlichen Quellsalzes entfernt zähe Beläge auf rein natürlicher Basis und mindert den Säurestress der Schleimhäute. Emsan® Hals- und Rachenspray Family wirkt unterstützend bei starker Stimmbelastung, Schleimhauttrockenheit und Räusperzwang und kann auch bei refluxbedingten Stimmstörungen angewendet werden.

Emsan® Hals- und Rachenspray Family ist gut verträglich und kann daher auch von Kindern ab 1 Jahr, älteren Menschen sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit bei bestimmungsgemäßem Gebrauch angewendet werden.

Dosierungsanleitung:

Kinder ab 1 Jahr: 1 bis 2 Sprühstöße, Schulkinder und Erwachsene: 1 bis 3 Sprühstöße in den Hals- und Rachenraum sprühen. Je nach Bedarf kann diese Anwendung bis zu 12-mal täglich wiederholt werden. Dabei ist die Flasche möglichst senkrecht zu halten.

Hinweis:

Vor der ersten Benutzung des Emsan® Hals- und Rachenspray Family Schutzkappe abnehmen und 2-3 × pumpen, um die Luft aus der Sprühdose zu entfernen. Aus hygienischen Gründen empfiehlt es sich, nach jedem Gebrauch den Sprühkopf trocken zu wischen und die Schutzkappe wieder aufzusetzen. Sollten Sie Emsan® Hals- und Rachenspray Family längere Zeit nicht benutzt haben, sprühen Sie den ersten Sprühstoß zur Reinigung des Adapters in die Luft. Betätigen Sie den Applikator nach Anbruch des Sprays regelmäßig, um einem möglichen Verstopfen der Pumpe durch Auskristallisieren von Salz vorzubeugen.

Gegenanzeigen:

Bitte nur bei Kindern anwenden, die in der Lage sind, während des Sprühvorgangs den Atem anzuhalten.

Anwendungsdauer:

Emsan® Hals- und Rachenspray Family kann unbegrenzt angewendet werden. Sollten sich die Beschwerden trotz der Verwendung von Emsan® Hals- und Rachenspray Family nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, empfehlen wir das Aufsuchen eines Arztes.

Nebenwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kam es in Einzelfällen zu Unverträglichkeiten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, konsultieren Sie Ihren Arzt.

Bitte beachten:

Emsan® Hals- und Rachenspray Family ist konservierungsmittelfrei und in einem Spezialsprühsystem abgefüllt. Dadurch können angebrochene Sprays bis zu 6 Monate nach Erstbenutzung angewendet werden. Emsan® Hals- und Rachenspray Family sollte nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfalldatums verwendet werden.

Bitte immer außer Reichweite von Kindern lagern. Aus hygienischen Gründen sollte die Sprayflasche nur von einer Person verwendet werden.

Darreichungsform und Packungsgröße:

20 ml Lösung zum Einsprühen in Hals- und Rachenraum.

Erläuterung der Symbole:



Charge



Verwendbar bis



Bitte Gebrauchsanweisung beachten



Die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie werden eingehalten



Nicht unterhalb 4°C und nicht oberhalb 50°C aufbewahren



Einzelner Patient – mehrfach anwendbar



Für Kinder unzugänglich aufbewahren



Medizinprodukt



Hersteller

Stand der Information: 2023-09



Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH, Mainzer Str. 1c, DE-56130 Bad Ems
www.emcur.com · service@emcur.com