



NATÜRLICHE PFLEGE DER ATEMWEGE

**EMSAN®**

## Kinder Nasenspülsalz multimineral



Bei häufigem  
Schnupfen und  
Pollenallergie

Mit Mineralien  
der Bad Emser  
Thermalquelle

**Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!**

### EMSAN® KINDERNASENSPÜLSALZ multimineral

**Medizinprodukt zur Reinigung der Nase.**

Bei **Emсан® Kindernasenspülsalz** handelt es sich um ein hochwertiges Medizinprodukt zur intensiven Reinigung der Nase bei Kindern ab 3 Jahren.

#### **Zusammensetzung:**

Mineralsalzmischung bestehend aus (g/kg): Natürlichem Quellsalz 50, Natriumhydrogencarbonat 205, Natriumchlorid 725, Kaliumsulfat 20.

Mit dieser sorgsam auf das Nasensekret abgestimmten Mineralsalzmischung wird die Nase auf gründliche und dabei schonende Weise von Schleim, Krankheitserregern, Allergenen und Schadstoffen wie Staub und Schmutz gereinigt.

Sie enthält:

- Natriumhydrogencarbonat zur besseren Lösung zäher, festsitzender Sekrete und Neutralisierung entzündlicher Stoffwechselprodukte
- Kaliumsulfat zur Unterstützung der Schleimhautabschwellung und Verbesserung der Durchblutung

- Natürliches Quellsalz mit Mineralstoffen und Spurenelementen zur Remineralisierung und Revitalisierung der Nasenschleimhaut

**Emсан® Kindernasenspülsalz** multimineral enthält keine chemischen Zusätze zur Konservierung oder Verbesserung der Fließeigenschaften wie dies z.B. bei Kochsalz aus dem Küchenregal der Fall ist.

#### **Anwendungsgebiete:**

Nasenspülungen bei Kindern haben sich bewährt

- zur Vorbeugung und Behandlung von akut oder chronisch auftretendem Schnupfen mit starker Schleimbildung
- zur Vorbeugung und Behandlung von wiederkehrenden Infekten in Folge von vergrößerten Rachenmandeln (Adenoiden = volkstümlich Polypen) mit und ohne Beteiligung des Mittelohrs (Paukenerguss)
- zur Behandlung bei Nasennebenhöhlenentzündungen
- zur unterstützenden Behandlung bei Pollenallergie

#### **Dosierungsanleitung:**

Zur Herstellung einer Nasenspüllösung wird jeweils ein Beutel **Emсан® Kindernasenspülsalz** multimineral in 125 ml warmem Wasser aufgelöst. Bitte achten Sie auf die vollständige Lösung des Salzes.

Nasenspülungen bei Kindern können bis zu 3 mal täglich mit je 125 ml Lösung durchgeführt werden. In der Regel empfiehlt sich die Durchführung 1 mal täglich mit 125 ml Lösung. Im Rahmen langfristiger Spültherapien (mehrere Monate und Jahre) haben sich auch Spülbehandlungen alle 2 bis 3 Tage bewährt.

#### **Bitte beachten:**

Wichtig ist das Einhalten der richtigen Konzentration der Spüllösung, da zu hoch oder zu niedrig konzentrierte Spüllösungen zu Reizerscheinungen und Nebenwirkungen führen können. **Emсан® Kindernasenspülsalz** multimineral nach Vorschrift aufgelöst ergibt immer eine isotone, d.h. dem Mineralstoffgehalt des Blutes angepasste, Salzlösung.

Das zur Herstellung der Spüllösung notwendige Wasser muss mindestens Trinkwasserqualität aufweisen. Leitungswasser sollte frisch aus einem laufenden Wasserhahn entnommen werden. Da **Emсан® Kindernasenspülsalz** multimineral keine

Konservierungsstoffe enthält, ist die hergestellte Spüllösung unmittelbar zu verbrauchen. In besonderen Krankheitsfällen, wie z.B. cystischer Fibrose oder unmittelbar nach operativen Eingriffen, sowie bei unklarer Trinkwasserqualität soll steriles oder abgekochtes Wasser verwendet werden.

#### Gegenanzeigen:

**Emsan® Kindernasenspülsalz** multimineral sollte nicht angewendet werden bei:

- Verletzungen am Nasendach und den Nebenhöhlenwänden, bei denen direkte Verbindungen zu den Flüssigkeitsräumen des Gehirns bestehen
- bei starkem Nasenbluten

#### Anwendungsdauer:

**Emsan® Kindernasenspülsalz** multimineral kann unbegrenzte Zeit angewendet werden, vorausgesetzt, die Spüllösung wird immer in der richtigen Konzentration hergestellt.

#### Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen kann es zu leichten Reizerscheinungen wie Kribbeln und Brennen in der Nase kommen. Im Einzelfall kann es bei Kindern sein, dass Flüssigkeit in den Rachen läuft und geschluckt oder eingeatmet wird, so dass es zu Hustenreiz und kurzzeitiger Luftnot kommen kann. Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich.

#### Bitte beachten Sie:

**Emsan® Kindernasenspülsalz** multimineral sollte nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfalldatums verwendet werden. Bitte lagern Sie **Emsan® Kindernasenspülsalz** multimineral immer außer Reichweite von Kindern.

#### Packungsgrößen:

**Emsan® Kindernasenspülsalz** multimineral ist in Packungen mit 20 Dosierbeuteln erhältlich.

#### Erläuterung der Symbole:

 Herstellungsscharge

 Verfallsdatum

 Bitte Packungsbeilage beachten

 Die Anforderungen der Medizinprodukte-richtlinie werden eingehalten

**Stand der Information:** Juni 2017

#### Herstellung und Vertrieb:



**EMCUR®**

Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH  
Mainzer Straße 1c  
DE-56130 Bad Ems  
[www.emcur.com](http://www.emcur.com), [service@emcur.com](mailto:service@emcur.com)



531358 2 D



← Laetus 82 · Bewegungs- des Druckmittels