



med

Lippen-Herpes-Patch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Anwendung!

15 Lippen-Herpes-Patches

Das Doppelherz med Lippen-Herpes-Patch ist ein Medizinprodukt und fördert die Wundheilung bei Lippen-Herpes.

Durch die Hydrokolloid-Technologie wird die betroffene Stelle zuverlässig vor äußeren Einflüssen geschützt. Die enthaltene Hyaluronsäure fördert den Heilungsprozess. Die feuchte Wundheilung lindert den Juckreiz und beugt der Bildung von Krusten und Narben vor. Dadurch wird der Heilungsprozess beschleunigt. Das Doppelherz med Lippen-Herpes-Patch sollte bereits bei den ersten Anzeichen – wie Rötung oder Brennen – angewendet werden, um einer Ausbreitung der Infektion entgegenzuwirken.

Das transparente Doppelherz med Lippen-Herpes-Patch ist wasserfest und dermatologisch getestet. Es schützt die von Lippen-Herpes betroffene Stelle bis zu 12 Stunden.

Zusammensetzung:

Inhaltsstoff: Hyaluronsäure

Patch-Materialien: Selbsthaftendes Hydrokolloid, PU

Vorsichtsmaßnahmen

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Nur auf Stellen anbringen, die von Lippen-Herpes betroffen sind.
- Falls Sie einen ärztlichen Rat einholen möchten, halten Sie die Verpackung oder diese Gebrauchsanweisung bereit.
- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem Sie wohnen, zu melden.

Wie wende ich das Doppelherz med Lippen-Herpes-Patch an?

1. Waschen Sie sich Ihre Hände und stellen Sie sicher, dass die zu behandelnde Stelle trocken und sauber ist. Die Verwendung von Cremes oder Ölen beeinträchtigt die Haftung des Patches auf der Haut.
2. Nachdem Sie das Doppelherz med Lippen-Herpes-Patch aus der Schutzverpackung genommen haben, entfernen Sie die erste Hälfte der Trägerfolie, ohne die klebende Seite des Patches mit den Händen zu berühren.
3. Platzieren Sie das Doppelherz med Lippen-Herpes-Patch auf die betroffene Stelle und entfernen Sie dann die zweite Hälfte der Trägerfolie, bis es vollständig haftet.

4. Drücken Sie das Patch mit dem Finger leicht an, um eine gute Haftung der gesamten Fläche des Patches zu gewährleisten. Nach 12 Stunden sollte das Patch gewechselt werden.

Es wird empfohlen, das Doppelherz med Lippen-Herpes-Patch so lange zu verwenden, bis die betroffene Stelle vollständig verheilt ist. Jedes Patch ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Aufbewahrung

An einem kühlen und trockenen Ort, vor Sonnenlicht und Wärme geschützt lagern.

Entsorgung:

Bitte entsorgen Sie die Verpackungsbestandteile gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt:

Faltschachtel: Papier - PAP 21

Plastik-Etui: Kunststoff - PP 5

Umverpackung des Pflasters: Papier - PAP 22

Trägerfolie: Kunststoff - PET 1



Eurosil S.p.A.
Viale Europa, 30
20047 - Cusago
Mailand, Italien

CE 0051



Queisser
PHARMA



GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND

doppelherz.de/kontakt



	Hersteller		Vertriebspartner
	Gebrauchsanweisung beachten		Medizinprodukt
	Trocken aufbewahren		Vor Sonnenlicht schützen
	Nicht wieder-verwenden		Verwendbar bis
	Eindeutige Produktidentifizierung		Chargenbezeichnung

Stand der Informationen: Rev. 00 24/07/2024



Queisser
PHARMA

Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND
www.doppelherz.de