



# Wund- & Heilsalbe

## 20 ml

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Anwendung.

Zur Anwendung bei Hautläsionen wie Wunden, Hautstellen, Verbrennungen, Abschürfungen und Geschwüren:

- Schützt vor äußeren Einflüssen
- Fördert die Wundheilung
- Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit

Doppelherz med Wund- & Heilsalbe auf Basis von Hyaluronsäure, Dimethicon und Vitamin E ist zur topischen Anwendung bei nicht-infizierten Wunden der Haut bestimmt.

Doppelherz med Wund- & Heilsalbe bildet eine Schutzbarriere über den Läsionen und trägt so zur Wiederherstellung der normalen physiologischen Bedingungen bei, die für die natürliche Regeneration der Haut notwendig sind. Sie fördert die körpereigenen Reparaturmechanismen der Haut. Hyaluronsäure zieht dank ihrer wasserbindenden Eigenschaften Wasser in der Wunde an; das dadurch stark hydratisierte Milieu ermöglicht eine korrekte Zellbewegung, das den natürlichen Prozess der Gewebereparatur erleichtert. Der durch die Salbe gebildete Film unterstützt die Bildung von neuem Hautgewebe und verschafft der Haut dabei optimale Bedingungen für die Versorgung mit Feuchtigkeit. Doppelherz med Wund- & Heilsalbe trägt zur Wundheilung bei, indem sie den natürlichen Heilungsprozess fördert und die behandelte Stelle vor der Ausbreitung eindringender Bakterien schützt.

- Hyaluronsäure erleichtert dank ihrer feuchtigkeitspendenden und befeuchtenden Eigenschaften den natürlichen Prozess der Geweberegeneration und fördert die Wundheilung.
- Vitamin E bildet eine schützende Barriere gegen das Eindringen von Mikroorganismen und stellt optimale Bedingungen zur Feuchtigkeitsversorgung an der behandelten Stelle her.
- Dimethicon als nicht-okklusiver Inhaltsstoff bildet eine dünne, undurchlässige Schicht über der geschädigten Haut, wodurch ein erhöhter Wasserverlust durch die oberste Hautschicht verhindert wird.

### Wann wird Doppelherz med Wund- & Heilsalbe angewendet?

Doppelherz med Wund- & Heilsalbe ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet. Sie wird angewendet bei kleinen Wunden, Schnittverletzungen, Abschürfungen, leichten örtlich begrenzten Verbrennungen und Hautgeschwüren, auch infolge von Diabetes. Doppelherz med Wund- & Heilsalbe ist ebenfalls anwendbar bei Hautreizungen, Windeldermatitis, Dekubitus sowie bei Verbrennungen und rissiger Haut, die durch äußere Einflüsse wie Sonne, Kälte oder Wind verursacht werden.

### Warum wird Doppelherz med Wund- & Heilsalbe angewendet?

Doppelherz med Wund- & Heilsalbe bildet eine schützende Barriere über den Läsionen und trägt so zur Wiederherstellung der normalen physiologischen Bedingungen bei, die für die natürliche Regeneration der Haut notwendig sind. Hyaluronsäure zieht dank ihrer hydrophilen Eigenschaften Wasser in der Wunde an; das stark hydratisierte Milieu ermöglicht eine korrekte Zellbewegung, die den natürlichen Prozess der Gewebereparatur erleichtert. Der durch die Salbe gebildete Film unterstützt die Bildung von neuem Hautgewebe und verschafft der Haut dabei optimale Bedingungen für die Versorgung mit Feuchtigkeit. Doppelherz med Wund- & Heilsalbe trägt zur Wundheilung bei, indem sie den natürlichen Heilungsprozess fördert und die behandelte Stelle vor der Ausbreitung eindringender Bakterien schützt.

### Anwendung und Dosierung

Waschen Sie sich vor und nach der Anwendung die Hände. Vor dem Auftragen der Doppelherz med Wund- & Heilsalbe bitte die betroffene Stelle reinigen. Tragen Sie 1-2 Mal täglich oder wie ärztlich verordnet eine dünne, gleichmäßige Schicht auf die gesamte betroffene Stelle auf. Lassen Sie die Doppelherz med Wund- & Heilsalbe von allein trocknen, damit sich der Schutzfilm bilden kann. Es besteht keine Gefahr einer möglichen Überdosierung des Produkts, da die Anwendung der Salbe ausschließlich topisch erfolgt. Für Erwachsene und Kinder (ab 3 Jahren).

### Zusammensetzung:

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Arachidyl Alcohol, Glycerin, Behenyl Alcohol, Phenoxyethanol, Arachidyl Glucoside, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Laureth-7, Sodium Hydroxide, Chamomilla Recutita Flower Extract, Silver Citrate, Hyaluronic acid (0,2 %), Dimethicone (5 %), Tocopheryl Acetate (1 %).

### Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Jede während der Anwendung des Produkts auftretende unerwünschte Nebenwirkung oder ein schwerwiegender Zwischenfall muss umgehend dem auf dem Produkt und in der Gebrauchsanweisung angegebenen Hersteller gemeldet werden.
- Treten unerwünschte Nebenwirkungen oder eine allergische Reaktion auf einen der Inhaltsstoffe auf, ist die Anwendung abzubrechen.
- Nicht schlucken.

- Augenkontakt vermeiden; bei Kontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
- Die Anwendung der Salbe kann gelegentlich vorübergehende Reizungen verursachen. Dies ist die einzig bekannte Nebenwirkung des Produkts, die nur gelegentlich und vorübergehend auftritt und keine Gegenmaßnahmen erfordert.
- Nicht zusammen mit anderen laufenden Therapien oder Behandlungen anwenden, bei denen andere Medizinprodukte oder Arzneimittel eingenommen oder topisch angewendet werden.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem Sie wohnen, zu melden.
- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht die behandelte Stelle nach dem Auftragen der Salbe reiben. Es wird empfohlen, die behandelte Stelle mit einem sterilen Mullverband zu schützen.
- Die Tube nach Gebrauch fest verschließen.
- Direkten Kontakt zwischen der Tube und der Wunde vermeiden.
- Das Produkt sollte nur von einer Person verwendet werden, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu vermeiden.
- Nicht verwenden, wenn die Tube offen oder beschädigt ist.
- Die Packungsbeilage sollte griffbereit aufbewahrt werden, um sie bei Bedarf zu Rate zu ziehen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 30 Tage hintereinander.
- Fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in der Apotheke bevor Sie das Produkt in der Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern unter 3 Jahren anwenden.

### Hinweise zur Aufbewahrung und Entsorgung

- Verwenden Sie das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach dem Öffnen.
- Nach Ablauf des auf der Verpackung aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf das sachgemäß gelagerte Produkt in der ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackung.
- Entsorgen Sie das Produkt nach Ablauf des Verfalldatums. Nicht verbrauchtes Produkt darf nicht über das Abwasser (z. B. über die Toilette oder das Waschbecken) oder den Hausmüll entsorgt werden. Dies trägt zum Schutz der Umwelt bei. Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten oder geben Sie das Medizinprodukt bei einer kommunalen Sammelstelle ab, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Leere Verpackungen bitte gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt entsorgen.
- Bewahren Sie das Produkt fest verschlossen auf und schützen Sie es vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit.



Nirial Pharma srl  
Via Rovani 7  
20123 Mailand  
Italien



Queisser  
PHARMA  
GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg  
DEUTSCHLAND  
www.doppelherz.de



20 ml Aluminiumtube



	Hersteller		Vertriebspartner
	Medizinprodukt		Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonnenlicht schützen		Trocken aufbewahren
	Untere Temperaturbegrenzung 5° C, obere Temperaturbegrenzung 30° C		Verwendbar bis
	Chargenbezeichnung		Katalognummer
	Modellnummer		Eindeutige Produktidentifizierung

Stand der Information: 01/2022



Queisser  
PHARMA  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg  
DEUTSCHLAND  
www.doppelherz.de