

Katar w miarę często się pojawia u małych dzieci i u niemowląt. Jeden z największych problemów polega na tym, że małe dzieci i niemowlęta nie potrafią wydymać nosa i potrzebują czasu, aby nauczyć się oddychać przez usta. Zatkany nos blokuje oddychanie, powoduje złe samopoczucie, może też spowodować poważniejsze problemy nosa, uszu, gardła i dróg oddechowych. Dlatego istotną jest czystość jamy nosowej. Arianna® Katarek Plus aspirator do nosa jest na to zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Badanie lekarskie jest oczywiście niezbędne, ponieważ tylko lekarz jest w stanie zdiagnozować powód kataru. Usuwanie wydzieliny z jamy nosowej przyspiesza leczenie, poprawia oddychanie i ogólne samopoczucie, a także wspiera zapobieganie chorobom.

Stosowanie: Urządzenie służy do usunięcia wydzieliny z jamy nosowej u dzieci! Nie wolno stosować do innych celów!

UWAGA:

Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przepłukać urządzenie gorącą pitną wodą. Nie należy moczyć w wodzie z detergentem.

Czyszczenie

Po każdym użyciu urządzenie należy oczyścić. Najlepiej natychmiast przepłukać wodą z kranu z dodatkiem detergentu odpowiedniego dla dzieci/niemowląt. Przepłukać gorącą lub ciepłą wodą. Wytrzeć zewnętrzną stronę głowicy ssącej miękką ściereczką lub

wacikami kosmetycznymi nawilżonymi alkoholem etylowym dostępnym w aptekach.

Nie należy stosować żadnego innego detergentu, żadnych innych chemikaliów, ani materiałów ściernych!

OSTRZEŻENIE!

W przypadku hemofilii lub krawienia z nosa należy skonsultować się z lekarzem!

Jeżeli po zastosowaniu urządzenia pojawi się wysypka alergiczna lub zaczerwienienie na nosie dziecka, należy przestać używać urządzenia! Należy skonsultować się z lekarzem!

W przypadku stosowania urządzenia dla kilkorga dzieci zalecone jest używanie więcej głowic ssących i ich oznaczenie. Jeżeli jest to niemożliwe, należy przed użyciem w wyżej wymieniony sposób dokładnie oczyścić głowicę ssącą.



OSTRZEŻENIE!

- Do używania nadaje się odkurzacz, którego moc wynosi 800-1800 W. (Bezpieczne stosowanie jest potwierdzone przez sprawozdanie z badań.) Należy sprawdzić instrukcję odkurzacza.
- Katarek Plus nie jest zabawka dla dzieci. Osoba dorosła powinna stosować urządzenie po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją.
- Nie wolno używać urządzenia do innych celów, niż jest to określone w zakresach stosowania.
- Nie używać urządzenia z uszkodzoną lub brakującą częścią.
- Należy oczyścić końcówkę głowicy ssącej (A) czystą ściereczką, lub wacikiem nawilżonym alkoholem etylowym dostępnym w aptekach. Nie wolno używać innych chemikaliów!

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ciepłych.

MONTAŻ:

1. Włożyć głowicę ssącą (A) do cylindra pojemnika (B).
2. Włączyć odkurzacza.
3. Podłączyć złącze odkurzacza (C) do rury odkurzacza.

DZIAŁANIE:

1. Odpowiednią wydajność stosowanego urządzenia uzyskuje się w naturalnej pozycji ciała. Zaleca się wziąć niemowlaka w ramiona, lub posadzić dziecko na kolanach.
2. Należy umieścić głowicę ssącą (A) w ten sposób, aby szczelnie zablokowała jedno nozdrze i tak przytrzymać przez kilka sekund, w międzyczasie obserwować usuniętą wydzielinę w głowicy ssącej.
3. Powtórzyć te same czynności na drugim nozdrzu.
4. Ostrożnie poruszać głowicą w trakcie drugiej i trzeciej czynności, aby przyspieszyć proces.
5. Ssanie powinno potrwać po ok. 5 sekund dla każdego nozdrza.
6. Po zakończeniu procesu należy wyłączyć odkurzacza i oczyścić urządzenie wyżej określonym sposobem.
7. Powtórzyć proces 2-3 razy dziennie, lub według potrzeby.

Urządzenie można bezpiecznie używać przestrzegając zalecenia instrukcji urządzenia.

- A: Głowica ssąca
B: Pojemnik
C: Złącze do odkurzacza

**DEMONTOWANIE I CZYSZCZENIE**

1. Odłączyć złącze odkurzacza (C) od odkurzacza
2. Wyłączyć odkurzacza
3. Wypłukać części A i B bieżącą gorącą wodą z kranu natychmiast po użyciu i
4. umyć je według wyżej wymienionych instrukcji.
5. Wysuszyć na powietrzu.

Stosowane symbole:

	Nazwa i adres producenta:
	Należy zapoznać się z instrukcją użycia
	Ostrzeżenie!
LOT	Numer seryjny
	Chronić przed słońcem
v0X	Data i numer wersji obecnej „Instrukcji obsługi”

Nazwa i adres producenta:
Illés Csók és Társa Kft.
Budapest H-1146
Ajtósi Dürer sor 35.