

**Mivolis** 

**Gebrauchsanweisung  
für die Probenentnahme**  
**Bitte aufmerksam lesen**

# Selbsttest mit Laboranalyse Vitamin B12

## Wichtige Informationen

### Allgemeine Hinweise

- Dieses Produkt ist für die Anwendung von Personen ab 18 Jahren bestimmt.
- Die Produkte des Blutentnahmesets ausschließlich wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben verwenden.
- Bei unzureichender Betropfung (Blutmenge) ist keine Analyse möglich.  
**Bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Rückseite beachten.**
- Das Blutentnahmeset darf nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums (letzter Tag des angegebenen Monats und Jahres) nicht mehr verwendet werden.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen


- Aufbewahrung außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei vorliegender Blutungsneigung, Gerinnungsstörung, der Einnahme gerinnungsbeeinflussender Medikamente, während Schwangerschaft und Stillzeit sollte das Blutentnahmeset nur nach Rücksprache mit dem Arzt verwendet werden.
- Die Alkoholtupfer von potenziellen Zündquellen fernhalten.
- Die Alkoholtupfer dürfen nicht in Kontakt mit Schleimhäuten und Augen kommen und von ihnen ausgehende Dämpfe sollten nicht eingeatmet werden.
- Die Lanzetten (Stechhilfen) vor Gebrauch auf Beschädigungen prüfen und die Lanzette im Fall einer Beschädigung nicht benutzen.
- Die Kappen der Lanzetten (Stechhilfen) stellen einen sterilen Schutz dar. Nicht verwenden, wenn die Kappe bereits entfernt wurde.
- Die Produkte keinesfalls mehrfach verwenden, da dies zu Infektionen und schweren Verletzungen führen kann.
- Die für die Probenaufnahme markierten Bereiche der Trockenblutkarte nicht berühren.
- Die Trockenblutkarte darf nicht in Kontakt mit anderen Flüssigkeiten kommen.
- Eventuell auftretende schwerwiegende Vorfälle sollten dem Zusammensteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

## Inhalt

### 1 Karte zur Testaktivierung



### 1 Gebrauchsanweisung

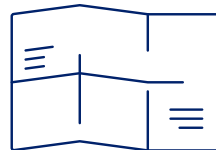

### 2 Alkoholtupfer


**Hersteller**  
B. Braun Melsungen AG  
Carl-Braun-Straße 1  
DE-34212 Melsungen



### 2 Lanzetten (Stechhilfen)


**Hersteller**  
Owen Mumford Ltd.  
Brook Hill, Woodstock  
UK-Oxfordshire OX20 1TU

**EC-Rep**  
Owen Mumford GmbH  
Alte Häge 1  
DE-63762 Großostheim

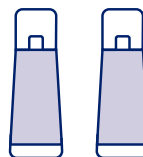


### 2 Kompressen

**Hersteller**  
Paul Hartmann AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
DE-89522 Heidenheim

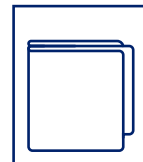


### 1 Trockenblutkarte in 1 Klarsichthülle

**Hersteller der Trockenblutkarte**  
Ahlstrom Germany GmbH  
Niederschlag 1  
DE-09471 Bärenstein

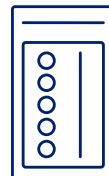

### 2 Pflaster

**Hersteller**  
BSN medical GmbH  
Schützenstr. 1-3  
DE-22761 Hamburg

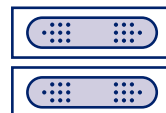

### 1 Rücksendeumschlag

Der Versand ist ausschließlich über Briefkästen oder Postfilialen der Deutschen Post innerhalb von Deutschland möglich und ist kostenfrei.



## Zweckbestimmung

Der **Mivolis Selbsttest mit Laboranalyse Vitamin B12** dient der Entnahme und dem Versand einer kapillaren Blutprobe auf einer Trockenblutkarte für die Laboruntersuchung des Vitamin B12-Werts über Holotranscobalamin, die aktive Form von Vitamin B12. Die kapillare Blutentnahme erfolgt mit der Lanzette (Stechhilfe). Die Einstichstelle wird mittels Alkoholtupfer gereinigt und mit einer Komresse und einem Pflasterstreifen versorgt. Die Anwendung kann in Eigenanwendung stattfinden. Für *in vitro*-Diagnosezwecke.

## Zusammensteller der Behandlungseinheit:

MVZ Labor Krone GmbH  
Siemensstraße 40  
DE-32105 Bad Salzufen  
[www.laborkrone.de](http://www.laborkrone.de)

Vertrieb durch/Verpackungserzeuger:  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  
Am dm-Platz 1  
DE-76227 Karlsruhe  
[www.dm.de](http://www.dm.de)  
[servicecenter@dm.de](mailto:servicecenter@dm.de)

Stand der Information: 01/2026

|                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ausreichend für 1 Anwendung                         |  CE-Kennzeichnung               |
|  Trocken aufbewahren                                 |  Strahlensterilisiert           |
|  Vor Hitze (Sonneneinstrahlung) schützen             |  Sterilisiert mit Ethylenoxid   |
|  Gebrauchsanweisung beachten                         |  Einfaches Sterilbarrieresystem |
|  Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist |  Biologische Risiken            |
|  Nicht wiederverwenden                               |  Nicht erneut sterilisieren     |
|  In-vitro-Diagnostikum                               |  Chargenbezeichnung             |
|  Medizinprodukt                                      |  Verwendbar bis                 |
|  Eindeutige Produktidentifizierung                   |  Katalognummer                  |
|  Hersteller                                          |  Herstellungsdatum              |



DMVB1201.26V03



Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Rückseite



# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

## SCHRITT 1

**Wichtig:** Vor der Probenentnahme den Test mithilfe der Beschreibung auf der **beiliegenden Karte zur Testaktivierung** im Online-Portal aktivieren.


Ohne vorherige Testaktivierung kann die Probe nicht analysiert werden.

Die Karte zur Testaktivierung bis zum Erhalt des Test-Ergebnisses **aufbewahren**.



## SCHRITT 2

Alle enthaltenen Utensilien entnehmen und zur Vorbereitung auf eine flache, saubere Fläche legen.

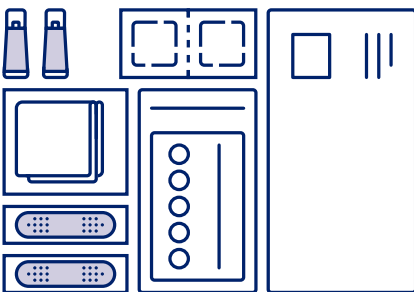

## SCHRITT 3


Hände gut mit warmem Wasser und Seife waschen.



## SCHRITT 4


Die Trockenblutkarte entnehmen und bereitlegen, ohne das Innere der Kreise zu berühren.

Die Klarsichthülle nicht entsorgen, da sie noch für den Versand benötigt wird.

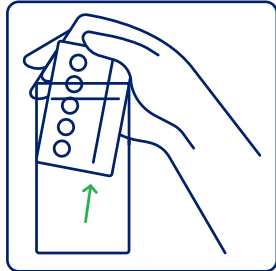


## SCHRITT 5

Die Lanzette (Stechhilfe) durch Drehen der weißen Kappe öffnen und diese abziehen. Die geöffnete Lanzette bereitlegen.

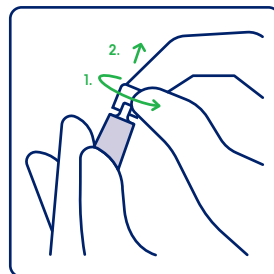


## SCHRITT 6

Um die Durchblutung anzuregen, den Arm 5-10 Mal kreisen und anschließend den Mittel- oder Ringfinger mit leichtem Druck von der Handinnenfläche zur Fingerkuppe massieren.

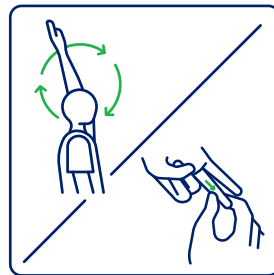

## SCHRITT 7

Mittel- oder Ringfinger mit dem beiliegenden Alkoholtupfer reinigen und ca. 15 Sekunden warten, bis es getrocknet ist.

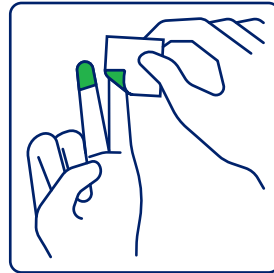


## SCHRITT 8

Die Kompressse öffnen und bereitlegen. Die Hand auf eine feste Unterlage legen und die Lanzette (Stechhilfe) leicht seitlich gegen die Fingerkuppe des Mittel- oder Ringfingers drücken. Die Lanzette löst durch Druck automatisch aus. Jede Lanzette kann und darf nur einmal verwendet werden.

Nach dem Einstich die Arme herabhängen lassen, um den Blutfluss anzuregen. Bei Bedarf den Finger mit leichtem Druck von der Handinnenfläche zur Fingerkuppe massieren.


Den ersten Blutstropfen mit der Kompressse abwischen.

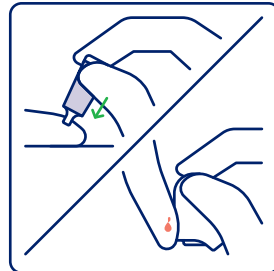

## SCHRITT 9

Die folgenden Blutstropfen auf die vorgedruckten Kreise der Trockenblutkarte tropfen. Alle 5 Kreise der Trockenblutkarte füllen. Dafür das Blut auf der **Vorderseite** auftragen.


**Wichtig:** Die Kreise sollten gut gefüllt und gleichmäßig durchgezogen sein, sodass die Karte auf Vorder- und Rückseite etwa gleich aussieht. Nur so ist eine Analyse im Labor möglich.

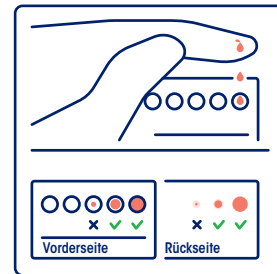

Bei Bedarf den Finger leicht massieren, um den Blutfluss weiter anzuregen. Sofern notwendig, die Durchführung mit der zweiten Lanzette (Stechhilfe) an einem anderen Finger wiederholen. Bereits getrocknetem Blut darf kein neues Blut mehr hinzugefügt werden. Die Einstichstelle anschließend ggf. mit der beiliegenden Kompressse und dem Pflaster versorgen.

## SCHRITT 10


Die Trockenblutkarte **mindestens 2 Stunden** bei Raumtemperatur trocknen lassen. Dazu die Karte schräg an einen Gegenstand lehnen. Die Trockenblutkarte nicht ins Sonnenlicht legen und keine Heizquelle zur Trocknung verwenden.

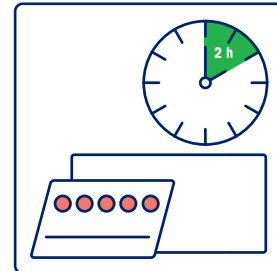

## SCHRITT 11

Die getrocknete Trockenblutkarte in die Klarsichthülle geben und verschließen, ohne das Innere der Kreise zu berühren.

Jeweils nur eine Trockenblutkarte in die Klarsichthülle geben.

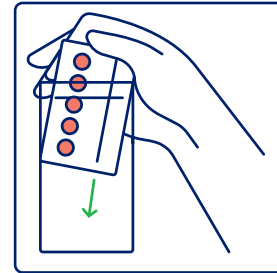

## SCHRITT 12

Die Trockenblutkarte in der Klarsichthülle in den Rücksendeumschlag geben. Der Versand ist ausschließlich über Briefkästen oder Postfilialen der Deutschen Post innerhalb von Deutschland möglich und ist kostenfrei.

**Wichtig:** Die Probe noch am selben Tag mit der Post versenden, spätestens am Folgetag.

