

Mivolis

**Gebrauchsanweisung
für die Probenentnahme**
Bitte aufmerksam lesen

Selbsttest mit Laboranalyse Eisen

Wichtige Informationen

Allgemeine Hinweise

- Dieses Produkt ist für die Anwendung von Personen ab 18 Jahren bestimmt.
- Die Produkte des Blutentnahmesets ausschließlich wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben verwenden.
- Bei unzureichender Befüllung (Blutmenge) ist keine Analyse möglich.
Bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Rückseite beachten.
- Das Blutentnahmeset darf nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums (letzter Tag des angegebenen Monats und Jahres) nicht mehr verwendet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen


- Aufbewahrung außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei vorliegender Blutungsneigung, Gerinnungsstörung, der Einnahme gerinnungsbeeinflussender Medikamente, während Schwangerschaft und Stillzeit sollte das Blutentnahmeset nur nach Rücksprache mit dem Arzt verwendet werden.
- Die Alkoholtupfer von potenziellen Zündquellen fernhalten.
- Die Alkoholtupfer dürfen nicht in Kontakt mit Schleimhäuten und Augen kommen und von ihnen ausgehende Dämpfe sollten nicht eingeatmet werden.
- Die Lanzetten (Stechhilfen) vor Gebrauch auf Beschädigungen prüfen und die Lanzette im Fall einer Beschädigung nicht benutzen.
- Die Kappen der Lanzetten (Stechhilfen) stellen einen sterilen Schutz dar. Nicht verwenden, wenn die Kappe bereits entfernt wurde.
- Die Produkte keinesfalls mehrfach verwenden, da dies zu Infektionen und schweren Verletzungen führen kann.
- Eventuell auftretende schwerwiegende Vorfälle sollten dem Zusammensteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Inhalt

1 Karte zur Testaktivierung



1 Gebrauchsanweisung

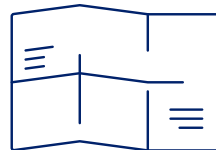

2 Alkoholtupfer


Hersteller
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
DE-34212 Melsungen



2 Lanzetten (Stechhilfen)


Hersteller
Owen Mumford Ltd.
Brook Hill, Woodstock
UK-Oxfordshire OX20 1TU

EC-Rep
Owen Mumford GmbH
Alte Häge 1
DE-63762 Großostheim

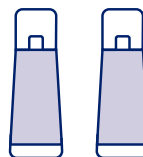


2 Kompressen

Hersteller
Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Straße 12
DE-89522 Heidenheim

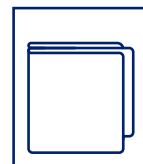


1 Kapillarblutröhrchen mit 1 Versandröhrchen

Hersteller des Kapillarblutröhrchens
SARSTEDT AG & Co. KG
Sarstedtstraße 1
DE-51588 Nürnberg

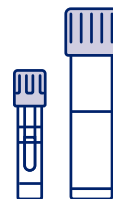

2 Pflaster

Hersteller
BSN medical GmbH
Schützenstr. 1-3
DE-22761 Hamburg

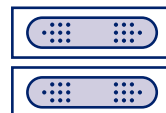

1 Rücksendeumschlag

Der Versand ist ausschließlich über Briefkästen oder Postfilialen der Deutschen Post innerhalb von Deutschland möglich und ist kostenfrei.



Zweckbestimmung

Der **Mivolis Selbsttest mit Laboranalyse Eisen** dient der Entnahme und dem Versand einer kapillaren Blutprobe in einem Kapillarblutröhrchen für die Laboruntersuchung des Eisen-Gehalts über das Speicherprotein Ferritin. Die kapillare Blutentnahme erfolgt mit der Lanzette (Stechhilfe). Die Einstichstelle wird mittels Alkoholtupfer gereinigt und mit einer Kompressen und einem Pflasterstreifen versorgt. Die Anwendung kann in Eigenanwendung stattfinden. Für *in vitro*-Diagnosezwecke.

Zusammensteller der Behandlungseinheit:

MVZ Labor Krone GmbH
Siemensstraße 40
DE-32105 Bad Salzuflen
www.laborkrone.de

Vertrieb durch / Verpackungserzeuger:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de
servicecenter@dm.de

Stand der Information: 01/2026

 Ausreichend für 1 Anwendung	 CE-Kennzeichnung
 Trocken aufbewahren	 Strahlensterilisiert
 Vor Hitze (Sonneneinstrahlung) schützen	 Sterilisiert mit Ethylenoxid
 Gebrauchsanweisung beachten	 Einfaches Sterilbarrieresystem
 Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist	 Biologische Risiken
 Nicht wiederverwenden	 Nicht erneut sterilisieren
 In-vitro-Diagnostikum	 Chargenbezeichnung
 Medizinprodukt	 Verwendbar bis
 Eindeutige Produktidentifizierung	 Katalognummer
 Hersteller	 Herstellungsdatum



DMFERR01.26V03



Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Rückseite



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

SCHRITT 1

Wichtig: Vor der Probenentnahme den Test mithilfe der Beschreibung auf der **beiliegenden Karte zur Testaktivierung** im Online-Portal aktivieren.


Ohne vorherige Testaktivierung kann die Probe nicht analysiert werden.

Die Karte zur Testaktivierung bis zum Erhalt des Test-Ergebnisses **aufbewahren**.



SCHRITT 2

Alle enthaltenen Utensilien entnehmen und zur Vorbereitung auf eine flache, saubere Fläche legen.

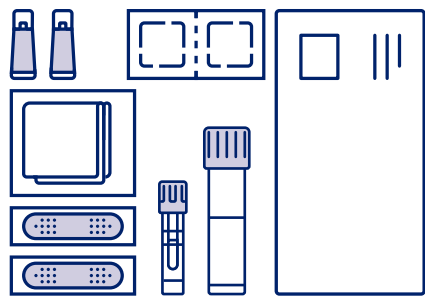

SCHRITT 3


Hände gut mit warmem Wasser und Seife waschen.



SCHRITT 4


Das Kapillarblutröhrchen aufschrauben und bereit stellen.

Den Barcode auf dem Kapillarblutröhrchen nicht entfernen.

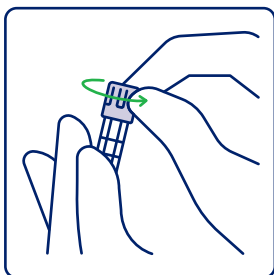


SCHRITT 5

Die Lanzette (Stechhilfe) durch Drehen der weißen Kappe öffnen und diese abziehen. Die geöffnete Lanzette bereitlegen.

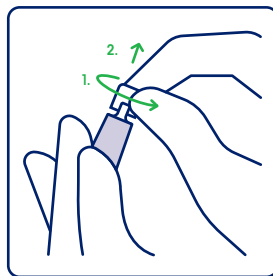


SCHRITT 6

Um die Durchblutung anzuregen, den Arm 5-10 Mal kreisen und anschließend den Mittel- oder Ringfinger mit leichtem Druck von der Handinnenfläche zur Fingerkuppe massieren.

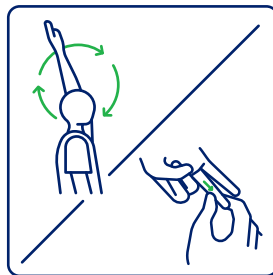

SCHRITT 7

Mittel- oder Ringfinger mit dem beiliegenden Alkoholtupfer reinigen und ca. 15 Sekunden warten, bis es getrocknet ist.

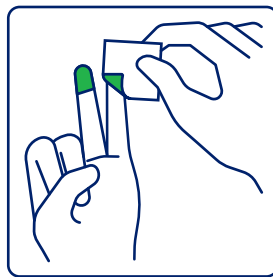


SCHRITT 8

Die Komresse öffnen und bereitlegen. Die Hand auf eine feste Unterlage legen und die Lanzette (Stechhilfe) leicht seitlich gegen die Fingerkuppe des Mittel- oder Ringfingers drücken. Die Lanzette löst durch Druck automatisch aus. Jede Lanzette kann und darf nur einmal verwendet werden.

Nach dem Einstich die Arme herabhängen lassen, um den Blutfluss anzuregen. Bei Bedarf den Finger mit leichtem Druck von der Handinnenfläche zur Fingerkuppe massieren.


Den ersten Blutstropfen mit der Komresse abwischen.

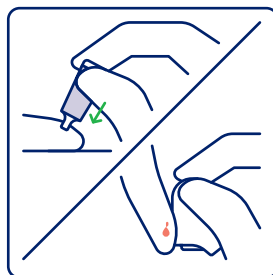

SCHRITT 9


Die folgenden Blutstropfen in das Kapillarblutröhrchen geben und dieses bis zur oberen Markierung (500 µl) füllen.

Bei Bedarf den Finger leicht massieren, um den Blutfluss weiter anzuregen. Sofern notwendig, die Durchführung mit der zweiten Lanzette an einem anderen Finger wiederholen. Die Einstichstelle anschließend ggf. mit der beiliegenden Komresse und dem Pflaster versorgen.

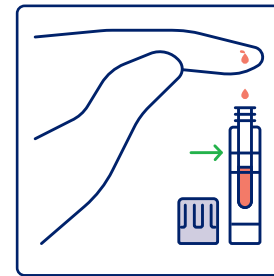


SCHRITT 10

Den Deckel auf das Kapillarblutröhrchen setzen und dieses durch Herunterdrücken fest verschließen.

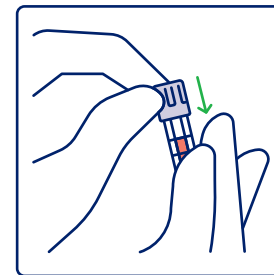

SCHRITT 11

Das Kapillarblutröhrchen in das Versandröhrchen geben und dieses fest zudrehen. Das im Versandröhrchen enthaltene Saugvlies nicht entfernen.

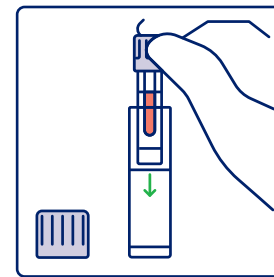

SCHRITT 12

Das Kapillarblutröhrchen im Versandröhrchen in den Rücksendeumschlag geben. Der Versand ist ausschließlich über Briefkästen oder Postfilialen der Deutschen Post innerhalb von Deutschland möglich und ist kostenfrei.

Wichtig: Die Probe noch am selben Tag mit der Post versenden, spätestens am Folgetag.

