

Medizinprodukt

Ohren- Reinigungsspray

zur Erweichung und Entfernung von Cerumen
(Ohrenschmalz)

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Anwendungsgebiet:

Mivolis Ohren-Reinigungsspray weicht Cerumen auf und unterstützt den Selbstreinigungsvorgang. Das Spray ist speziell auf die physiologischen pH-Bedingungen des äußeren Ohrkanals angepasst und eine regelmäßige Anwendung beugt der Ansammlung von Ohrenschmalz und Verunreinigungen im Gehörgang vor. Das Spray überbrückt den Gebrauch von Wattestäbchen.

Das Ohren-Reinigungsspray ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Kinder unter 12 Jahren bei der Anwendung unterstützen.

Zusammensetzung:

Isotonisierte, hochreine Salzlösung.

Anwendungsbeschränkung:

Bei Verletzung des Trommelfells, Schwindel, akuten Schmerzen, Schwellung, Ausfluss des Ohres, Infektion, Tinnitus (klingende Geräusche im Ohr), Kribbeln im Ohr oder einer Ohrenspülung während der letzten zwei bis drei Tage und im Allgemeinen bei Menschen mit medizinischer Vorgeschichte (medizinische oder chirurgische Eingriffe im Bereich des Ohres) sollte das **Ohren-Reinigungsspray** nicht angewandt werden. Das Medizinprodukt sollte nicht bei größeren Cerumenansammlungen (Pfropfen) angewendet werden.

Bisher sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Das Spray sollte nicht gleichzeitig mit anderen Präparaten zur Anwendung im äußeren Gehörgang oder in **Gegenwart von Fremdkörpern** (Hörgeräte) angewendet werden!

Anwendungs- / Dosieranleitung:

Das **Ohren-Reinigungsspray** kann je nach Bedarf 1–2 mal täglich angewendet werden. Bitte halten Sie zwischen den Anwendungen einen Zeitabstand von mindestens einer Stunde ein. Für Träger von Hörprothesen: Bitte zuerst das Hörgerät abnehmen, damit das überschüssige Ohrenschmalz keine Fehlfunktion des Gerätes verursacht. Setzen Sie das Hörgerät erst nach dem Trocknen des Gehörgangs wieder ein! Das **Ohren-Reinigungsspray** sollte aus hygienischen Gründen nur von einer Person verwendet werden.

Anwendung:

Der transparente Schutzaufsatz an der Spitze des Sprühkopfes darf nicht entfernt werden! Um Reizungen zu vermeiden, sollte die Spitze des Sprays nicht in den Gehörgang eingeführt, sondern nur an den Gehörgang gehalten werden.

Bei Erstgebrauch 1–2 Sprühstöße in die Luft geben, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel entsteht. Für die Anwendung ist die Flasche gerade zu halten und die Spitze des Sprays an den Eingang des Gehörganges zu halten. Durch Drücken auf den Aufsatz des Sprays 1–2 Sprühstöße in den äußeren Gehörgang sprühen.

Der Ansatz des Ohres sollte einige Sekunden massiert werden, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Warten Sie wenigstens 10 Minuten, damit sich das Cerumen vollständig aufweicht! Liegt eine stärkere Verstopfung vor, sollte das Spray mindestens 15 Minuten einwirken. Neigen Sie anschließend den Kopf zur Seite, damit die Restflüssigkeit herausläuft (hierfür kann ein Taschentuch verwendet werden), und wischen diese ab. Das Ohr darf nach der Anwendung nicht mit Watte oder Ähnlichem verschlossen werden. Liegt weiterhin eine Verstopfung vor, ist die Anwendung zu wiederholen und die Einwirkzeit etwas zu verlängern.

Achten Sie darauf, dass das **Ohren-Reinigungsspray** nach der Anwendung nahezu vollständig aus dem Ohr abfließen kann. Sollten spürbare Reste der Lösung im Ohr verbleiben, spülen Sie das Ohr vorsichtig mit warmem Wasser.

Nach jeder Anwendung den Sprühaufsatz mit warmem Wasser abspülen oder mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen.

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen/Nebenwirkungen:

Ein Druck- und Verstopfungsgefühl im Ohr kann auch auf eine behandlungsbedürftige Entzündung, z. B. eine Mittelohrentzündung, hinweisen und sollte bei einem entsprechenden Verdacht oder anhaltenden Symptomen von einem Arzt begutachtet werden.

Wer von größeren Cerumenansammlungen in kürzeren Zeitabständen betroffen ist, sollte frühzeitig und regelmäßig in vorbeugender Weise das **Ohren-Reinigungsspray** einsetzen. Wenn die Cerumenansammlungen zu groß sind, wird möglicherweise das Produkt ungeeignet sein. In diesem Fall ist das Spülen durch einen Arzt anzuraten. Das Spray sollte nicht gleichzeitig mit Medikamenten angewandt werden, die für die lokale Anwendung bei Ohrenerkrankungen angewandt werden (Ohrentropfen). Bitte halten Sie einen Zeitabstand von mindestens einer Stunde ein.

Das **Ohren-Reinigungsspray** nicht in die Augen gelangen lassen. Andernfalls die Augen sofort gründlich mit Leitungswasser spülen.

Verwenden Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Reinigung des Gehörganges (Verletzungsgefahr). Bei auftretender oder bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber dem Ohren-Reinigungsspray oder einem seiner Bestandteile darf das Produkt nicht angewendet werden.

Weitere Hinweise:

Bei Fragen oder Schmerzen vor dem Gebrauch des Produktes sollte ein Arzt oder Apotheker zu Rate gezogen werden. Wenn sich bereits ein Ceruminalpfropf gebildet hat, kann dieser durch die Einwirkung von **Ohren-Reinigungsspray** aufquellen und Schmerzen verursachen. (Suchen Sie in diesem Fall Ihren Arzt auf). Treten unerwünschte Wirkungen, wie z. B. Schmerzen, Druckgefühl oder andere Missempfindungen auf, ist die Anwendung zu beenden. Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, sollte ein Arzt oder Apotheker zurate gezogen werden. Dasselbe gilt für besondere Reaktionen und Nebenwirkungen auf das Medizinprodukt.

Meldung von schweren unerwünschten Wirkungen bzw. Nebenwirkungen

Sollten bei der Verwendung des Ohren-Reinigungsprays schwere unerwünschte Wirkungen bzw. schwere Nebenwirkungen (schwere Vorfälle) auftreten, melden Sie diese bitte an uns und die zuständige Behörde BfArM:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

- Abt. Medizinprodukte -

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

DE-53175 Bonn

E-Mail: mp-vigilanz@bfarm.de

Website: www.bfarm.de

Lagerhinweis:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Lagerung zulässiger
Temperaturbereich
5 °C bis 25 °C.



Trocken
lagern.



Vor Sonnenbestrahlung
schützen

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Nach Anbruch einer Packung darf **Ohren-Reinigungsspray** nicht länger als 4 Wochen benutzt werden.

Entsorgungshinweis:

Die Entsorgung sollte gemäß den jeweiligen regionalen Vorgaben erfolgen.

Inhalt:

20 ml e

Stand der Information: 08/2020

Vertrieb durch:
dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at



Hersteller:
Euro Vital Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 47
DE-22453 Hamburg



60014903-250-04 112339-003