



Anwendung:

Schritt 1: Die Einlegesohlen, die in Ihre Schuhe kam, sind wahrscheinlich herausnehmbar - nehmen Sie sie zuerst heraus.

Schritt 2: Legen Sie Ihre Plantarfasziitis-Orthesen in den Schuh, Stoffseite nach oben, um die Größe zu testen. Wenn nötig, schneiden Sie die Orthese entlang der Umrisse (unten der orthopädischen Nähe der Zehen), die zu Ihrer Schuhgröße passt.

Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass Ihre Orthese flach auf der Unterseite Ihres Schuhs liegt, insbesondere im Zehenbereich. Wenn es nicht ohne Bündeln passt, schneiden Sie es nach Bedarf weiter.

Ersetzen Sie die Einlegesohlen alle sechs (6) Monate oder bei ersten Gebrauchsspuren.



Wie es funktioniert?

Plantarfasziitis tritt auf, wenn das Band des Gewebes entlang der Unterseite Ihres Fußes, sogenannte Plantarfaszie, überdehnt wird und die Befestigung am Fersenknochen verschlimmert. Dies kann bei jedem Schritt Schmerzen verursachen.

Dr. Scholl's Schmerzlinderung Orthopädische Einlegesohlen für Plantarfasziitis sorgen für doppelte Entlastung durch die Behandlung der Quelle Ihrer Schmerzen. Die Einlegesohlen polstern und schützen Ihren Fuß vor den erschwerenden Stößen jedes Schrittes und unterstützen Ihren Fußgewölbe, um zu verhindern, dass sich die Plantarfaszie weiter dehnt, damit sie heilen kann.



Plantarfasziitis.

Plantarfasziitis tritt auf, wenn das Band des Gewebes entlang der Unterseite Ihres Fußes, sogenannt Plantarfaszie, überdehnt wird und die Befestigung am Fersenknochen verschlimmert. Dies kann bei jedem Schritt Schmerzen verursachen.

Dr. Scholl's Schmerzlinderung Orthopädische Einlegesohlen für Plantarfasziitis sorgen für doppelte Entlastung durch die Behandlung der Quelle Ihrer Schmerzen. Die Einlegesohlen polstern und schützen Ihren Fuß vor den erschwerenden Stößen jedes Schrittes und unterstützen Ihren Fußgewölbe, um zu verhindern, dass sich die Plantarfaszie weiter dehnt, damit sie heilen kann.