

## Anweisungen zum Aufkleben und Austauschen der Blasenpflaster

### Warnhinweise

Nur zur äußeren Anwendung. Kontakt mit den Augen vermeiden. Im Zweifelsfall an medizinische Fachkraft wenden. Bei Allergie auf Wundauflage oder ihre Bestandteile nicht verwenden.

### Anwendungshinweise

Nur zur äußeren Anwendung. Kontakt mit den Augen vermeiden. Im Zweifelsfall an medizinische Fachkraft wenden.

Bei Diabetes, schlechter Durchblutung oder Empfindungsstörungen in den Füßen bitte vor Selbstbehandlung einer Blase immer eine medizinische Fachkraft aufsuchen.

### Anwendung

**SCHRITT 1**



Entferne die Schutzfolie von dem Pflaster und platziere mit der Klebeseite nach unten auf die Mitte der Blase.

**SCHRITT 2**



Entferne die Schutzfolie und drücke den Kleberand fest auf die Haut, um das Pflaster und die Blase zu versiegeln. Ersetze die Bandage, wenn sie sich zu lösen beginnt.