

Hansaplast Sommerbegleiter Promotasche

Anwendungshinweise:

Eine saubere und gereinigte Wunde ist der erste Schritt für eine optimale Heilung. Um die Wunde effektiv vor Infektionen zu schützen, sprühe das Hansaplast Wundspray aus einer Entfernung von ca. 10 cm auf die gesamte Wunde, um Schmutz und sichtbare Partikel zu entfernen. Wenn notwendig, wiederholen. Trockne anschließend vorsichtig die Wunde und die umliegende Haut. Für weitere Informationen und Anwendungshinweise lies bitte die Packungsbeilage. Wichtig: In der Regel hören kleinere Verletzungen nach kurzer Zeit auf zu bluten. Sollte die Blutung nicht stoppen, übe mit einer Kompresse Druck auf die Wunde aus und wende dich an medizinisches Fachpersonal. Der zweite Schritt ist der Schutz der Wunde vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Bakterien, um eine ungestörte Heilung zu ermöglichen. Schütze deine Wunde mit einem geeigneten Pflaster oder einem sterilen Wundverband von Hansaplast. Wenn nicht anders vom Arzt empfohlen, sollte das Pflaster oder der sterile Wundverband täglich gewechselt werden. Mehr dazu findest du in unserem Artikel Das Einmaleins der Wundversorgung. In einem dritten Schritt kannst du deiner Wunde helfen, sicher, schnell und mit geringerem Narbenrisiko zu heilen. Trage dafür Hansaplast Wundheilsalbe regelmäßig bis zur vollständigen Heilung auf. Die Hansaplast Wundheilsalbe kann auf kleineren, oberflächlichen Wunden in jeder Phase des Heilungsprozesses angewendet werden. Wenn notwendig, die Wunde mit einem Pflaster, einem sterilen Wundverband oder einer Kompresse von Hansaplast abdecken.

48383-00000-90 Wundheilsalbe

Zusammensetzung: Weißes Vaseline, Düninflüssiges Paraffin-Öl, Ceresin Wachs, Glycerin, Panthenol, Glyceryl Stearate

Warn-/ Aufbewahrungshinweise: Nicht unter 5 oder über 30 Grad Celsius lagern. Trocken aufbewahren. Bitte Packungsbeilage lesen. Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Wundspray 48388-00000-48

Zusammensetzung: 0,1 % Decylglucoside Tensid und 0,04 % Polihexanid (PHMB) als Konservierungsmittel in Ringerlösung.

Warn-/ Aufbewahrungshinweise: Nicht unter 5°C und über 30°C lagern! Trocken aufbewahren. Gebrauchsanweisung beachten.

76533-00000-45 Aqua Protect 20 Strips

Warn-/ Aufbewahrungshinweise: Naturkautschuklatex ist enthalten oder anwesend Nicht wiederverwenden. Trocken aufbewahren.

48835-01010-45 Aqua Protect Kids 20 Strips

Warn-/ Aufbewahrungshinweise: Naturkautschuklatex ist enthalten oder anwesend Nicht wiederverwenden. Trocken aufbewahren Nicht über 25°C lagern!