

Wyrób medyczny

Spray do nosa z wodą morską

Przewidziane zastosowanie:

Spray do nosa z wodą morską służy do fizycznego oczyszczania i nawilżania wrażliwej i suchej błony śluzowej nosa.

Skład:

Co zawiera Spray do nosa z wodą morską?

1 ml roztworu zawiera: 1 ml izotonicznego roztworu soli morskiej odpowiadającego 0,9% roztworowi chlorku sodu.

Uwaga:

Bez środków konserwujących.

Postać wyrobu i zawartość opakowania:

Co to jest Spray do nosa z wodą morską i w jakim celu się go stosuje?

Spray z dozownikiem zawierającym 20 ml roztworu do rozpylania w nosie i płukania nosa

Wskazania do stosowania:

Kiedy należy stosować Spray do nosa z wodą morską?

Spray do nosa z wodą morską stosuje się:

- Do nawilżania błony śluzowej nosa w przypadku suchego powietrza oraz w ogrzewanych i klimatyzowanych pomieszczeniach. Spray do nosa z wodą morską zapobiega tzw. „suchemu nosowi”.
- Do oczyszczania błony śluzowej nosa przy wzmożonym narażeniu na pyłki i kurz domowy. Można znowu oddychać przez nos, a produkt wspomaga proces samooczyszczania błony śluzowej nosa.
- Do wspomagającego leczenia kataru i kataru siennego
- Do wspomagającego leczenia w chorobach górnych dróg oddechowych (jamy nosowej i zatok przynosowych)
- Do usuwania strupków

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować produktu Spray do nosa z wodą morską?

Sprayu do nosa z wodą morską nie należy stosować w przypadku uczulenia/nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tego wyrobu medycznego wymienionych w punkcie „Skład”.

Stosowanie produktu Spray do nosa z wodą morską w okresie ciąży i karmienia piersią?

W przypadku stosowania zgodnego z zaleceniami nie stwierdzono szczególnego ryzyka w okresie ciąży i karmienia piersią.

Środki ostrożności i specjalne wskazówki:

W przypadku stosowania zgodnego z zaleceniami nie jest konieczne zachowanie szczególnych środków ostrożności. Po operacjach nosa lub urazach należy przed zastosowaniem leku zasięgnąć porady lekarza. Przed pierwszym użyciem należy potrząsnąć butelką i trzymać ją otworem do góry. Kilkakrotnie uruchomić system rozpylający. Po pojawieniu się równomiernej mgiełki produkt jest gotowy do użycia. Podczas używania butelkę w miarę możliwości trzymać pionowo. Spray rozpylać na krzyż, tzn. prawą ręką do lewego otworu nosowego i na odwrot, tak aby podczas rozpylania spray był skierowany w stronę ucha. Następnie zamknąć drugi otwór nosowy, do którego nie nastąpiło rozpylenie, i zrobić lekki wdech. Mimo specjalnego systemu rozpylającego z wbudowanym filtrem zalecamy ze względów higienicznych i dla uniknięcia zakażeń używać każdego dozownika tylko przez jedną osobę. Po użyciu zaleca się wytarcie aplikatora i przechowywanie dozownika w suchym miejscu. Po użyciu nałożyć z powrotem nasadkę ochronną na dozownik. Aby zapewnić niezawodną jakość produktu i działanie systemu aplikacyjnego przez cały okres używania, nie wolno wykonywać żadnych manipulacji przy pojemniku. Ewentualna pozostałość płynu jest koniecznością techniczną, a jej ilość została uwzględniona przy napełnianiu.

Zastosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

Interakcje z innymi środkami:

Brak znanych interakcji.

Instrukcja używania - dokładnie przeczytać!

Należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji używania, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące stosowania tego wyrobu medycznego. W celu uzyskania informacji o zagrożeniach i działaniach niepożądanych należy przeczytać instrukcję używania i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie, sposób podawania i czas używania:

Jak często i w jakiej ilości należy stosować Spray do nosa z wodą morską?

U dzieci w wieku od 2 do 6 lat stosować po jednym rozpyleniu.

U dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat stosować 1–2 rozpylenia.

Rozpylać do każdego otworu nosowego do 10 razy dziennie w zależności od potrzeb, wykonując przy tym delikatny wdech przez nos (0,14 ml na rozpylenie).

W przypadku jednoczesnego leczenia innym sprayem na katar należy użyć Sprayu do nosa z wodą morską godzinę wcześniej.

Jak długo należy stosować Spray do nosa z wodą morską?

Jeśli objawy nasiliły się lub po 7 dniach nie wystąpi poprawa, należy zasięgnąć porady lekarza.

W razie potrzeby Spray do nosa z wodą morską można stosować do czasu ustąpienia dolegliwości, czyli maksymalnie 30 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana ilości produktu Spray do nosa z wodą morską:

Zatrucia i objawy przedawkowania nie są znane.


Możliwe działania niepożądane?

Nie można wykluczyć lekkiego pieczenia w nosie. W sporadycznych przypadkach może dojść do krwawienia z nosa. W pojedynczych przypadkach może wystąpić nietolerancja składników produktu Spray do nosa z wodą morską. Na podstawie dostępnych danych nie można ilościowo określić częstości występowania.

Zgłaszanie działań niepożądanych/poważnych incydentów:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane lub pogorszenie stanu zdrowia związane z używaniem wyrobu medycznego, należy zgłaszać je pod adresem podanym w punkcie „Producent”. Poważne incydenty należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i (lub) pacjent mają swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dotyczy to również działań niepożądanych/poważnych incydentów niewymienionych w tej instrukcji używania. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania wyrobu medycznego.

Uwagi i wskazówki dotyczące trwałości wyrobu medycznego:

Spray do nosa z wodą morską można stosować tylko do daty, podanej na etykiecie i pudełku, oznaczonej jako  „Termin ważności”. Po otwarciu nie stosować przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Sposób przechowywania:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C i poniżej 5°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci!



Producent:


Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG
Industriestraße 6
52457 Aldenhoven, Niemcy

W celu zgłaszania działań niepożądanych i przekazywania informacji zwrotnej można zeskanować poniższy kod QR.



Ewentualnie można również skorzystać ze strony <https://pharma-aldenhoven.de/nebenwirkungen/>

Data sporządzenia informacji: wrzesień 2025

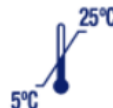

112584