

POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX
130 mm x 280 mm

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-010679_1		
Preparat/ Product:	Starazolin Suche i Podrażnione Oczy 10 ml (POLAND)		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 150 x 300 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt Tekst/ Text: Myriad Pro 8 pt		
Kolorystyka/ Colours:	 BLACK	Opracował/ Prepared by:	05.03.2026 M.Małodzińska

Starazolin[®]

Suche i Podrażnione Oczy

krople do oczu

Instrukcja użycia – należy uważnie przeczytać

Krople do oczu **Starazolin Suche i Podrażnione Oczy** są przeznaczone do stosowania w celu nawilżenia, łagodzenia podrażnień oraz ochrony suchych i podrażnionych oczu

SKŁAD

0,15% hialuronian sodu, 2% dekspantenol, chlorek sodu, cytrynian sodu dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Produkt nie zawiera konserwantów.

Produkt nie zawiera fosforanów.

PRZEZNACZENIE

Krople do oczu Starazolin Suche i Podrażnione Oczy łagodzą objawy suchego oka o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Stabilizują film łzowy, nawilżają i łagodzą podrażnienia powierzchni oka.

Stosowanie kropli do oczu zapewnia intensywną pielęgnację i ochronę przed:

- **suchością i podrażnieniami mechanicznymi spowodowanymi przez czynniki zewnętrzne:** wiatr, suche powietrze, klimatyzację, zanieczyszczenie powietrza, kurz, noszenie soczewek, diagnostyczne lub chirurgiczne zabiegi okulistyczne;
- **zmęczeniem i podrażnieniem oczu spowodowanym rzadkim mruganiem** podczas długotrwałego skupienia wzroku na: ekranach urządzeń cyfrowych, w trakcie prowadzeniu pojazdów lub pracy wymagającej precyzji.

Krople do oczu **Starazolin Suche i Podrażnione Oczy** mają podwójne działanie: zawierają **hialuronian sodu**, który skutecznie nawilża oczy i stabilizuje film łzowy oraz **dekspantenol (prowitamina B5)**, który dodatkowo wiąże wodę, łagodzi podrażnienia i chroni powierzchnię oka.

Stosowanie kropli szybko przynosi ulgę, zmniejszając nieprzyjemne objawy ze strony oczu.

Objawy suchego oka można złagodzić, a tym samym zapobiec powikłaniom.

Czynnikami ryzyka wystąpienia zespołu suchego oka, czyli zaburzeń filmu łzowego spowodowanych brakiem łez lub ich nadmiernym parowaniem, są:

- starszy wiek
- płeć (zmiany hormonalne u kobiet w czasie ciąży, karmienia piersią, menopauzy)
- współczesny styl życia (długotrwała praca przy komputerze, mieszkanie, praca i podróżowanie w klimatyzowanych pomieszczeniach)
- warunki otoczenia (wiatr, suche powietrze, kurz, dym, zanieczyszczenie powietrza, klimatyzacja, oświetlenie jarzeniowe)
- diagnostyczne i chirurgiczne zabiegi okulistyczne
- obecność ciała obcego w oku
- noszenie soczewek kontaktowych
- stosowanie kropli do oczu zmniejszających przekrwienie
- leki (stosowane w leczeniu depresji, nadciśnienia tętniczego, środki antykoncepcyjne)
- choroby (reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca, astma, problemy z tarczycą, jaskra).

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Kiedy nie stosować kropli do oczu Starazolin Suche i Podrażnione Oczy:

- w przypadku nadwrażliwości (w tym alergii) na hialuronian sodu, dekspantenol lub którykolwiek z pozostałych składników kropli do oczu **Starazolin Suche i Podrażnione Oczy**.

W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i zgłosić się do lekarza.

Inne uwagi:

- Nie stosować produktu, jeśli widoczne jest uszkodzenie butelki lub zakraplacza kropli do oczu **Starazolin Suche i Podrażnione Oczy**.
- Aby zapewnić bezpieczne stosowanie i higienę, każda butelka powinna być używana tylko przez jedną osobę.
- Nie są znane interakcje kropli do oczu **Starazolin Suche i Podrażnione Oczy** z płynami do pielęgnacji soczewek kontaktowych, innymi kroplami do oczu lub stosowanymi miejscowo maściami do oczu. W przypadku stosowania innego produktu do oczu należy odczekać co najmniej 15 minut przed jego podaniem do oka.

Uwaga:

Bezpośrednio po podaniu kropli do oczu przez bardzo krótki czas widzenie może być niewyraźne. W związku z tym zaleca się powstrzymanie od prowadzenia samochodu i obsługiwanie pojazdów lub maszyn dopóki nie powróci prawidłowa ostrość wzroku.

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA PRODUKTU

Krople do oczu **Starazolin Suche i Podrażnione Oczy nie zawierają konserwantów ani fosforanów**, dzięki czemu prawdopodobieństwo podrażnienia i uszkodzenia powierzchni oka jest mniejsze.

Zakraplacz zawiera wbudowany innowacyjny filtr, który zapewnia **bezpieczeństwo stosowania** produktu, ponieważ zapobiega zanieczyszczeniu i pozwala zachować jakość zawartości opakowania **nawet przez 6 miesięcy po otwarciu**.

Produkt jest na ogół dobrze tolerowany. Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić Producentowi oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pocztą elektroniczną (adres: incydenty@urpl.gov.pl), faksem (nr faksu: 22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa).

JAK STOSOWAĆ krople do oczu Starazolin Suche i Podrażnione Oczy

Krople do oczu Starazolin Suche i Podrażnione Oczy należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użycia. W razie wątpliwości przed zastosowaniem produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy wkraplać 1-2 krople do oczu kilka razy na dobę, w zależności od potrzeb.

Mrugnąć kilka razy, aby równomiernie rozprowadzić kroplę na powierzchni oka.

Produkt nadaje się do długotrwałego stosowania.


Unikać kontaktu końcówki zakraplacza z powierzchnią oka lub jakąkolwiek inną powierzchnią.

Przed pierwszym podaniem kropli do oka należy uaktywnić mechanizm butelki. W tym celu należy zdjąć zatyczkę z pompki, odwrócić butelkę do góry dnem i **kilkakrotnie nacisnąć zakraplacz, aż pojawi się pierwsza kropla.**


Informacja dla osób noszących soczewki kontaktowe
Produkt można stosować w czasie noszenia soczewek kontaktowych.

Instrukcja użycia


- 1. Dokładnie umyć ręce.
- 2. Zdjąć zatyczkę z pompki (rysunek 1).
- 3. Chwycić pompkę ręką, jak na rysunku 2.
- 4. Odwrócić butelkę do góry dnem i naciskać zakraplacz, dopóki nie pojawi się pierwsza kropla (rysunek 3).
- 5. Odchylić głowę do tyłu i ostrożnie wpuścić 1 kroplę do oka (rysunek 4).
- 6. Nałożyć zatyczkę na pompkę.

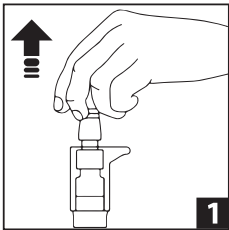


1. Zdjąć zatyczkę z pompki.

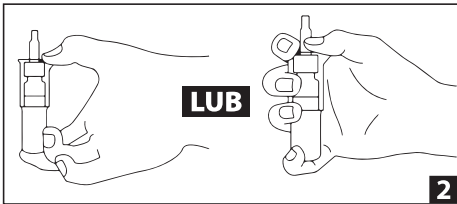

2. Chwycić pompkę ręką jednym z dwóch sposobów pokazanych na rysunku 2.

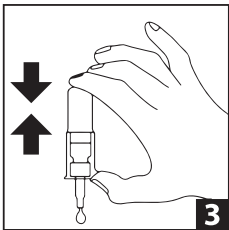

3. Odwrócić butelkę do góry dnem i uruchomić pompkę naciskając ją, aż pojawi się pierwsza kropla.

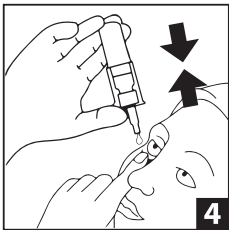

4. Przytrzymać butelkę do góry dnem i naciskając pompkę zakropić do oka przepisaną liczbę kropli.



JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka, Chorwacja



**Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.**
ul. Półpińska 19,
83-200 Starogard Gdański, Polska



TERMIN WAŻNOŚCI

Wydrukowano na opakowaniu. Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.

Po otwarciu butelki krople można stosować maksymalnie przez 6 miesięcy.

PRZECHOWYWANIE

Ten wyrób medyczny nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

OPAKOWANIE

10 ml



DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI

Luty 2023 r.

Objaśnienie symboli na produkcie

Symbol	Objaśnienie
	Przeczytać instrukcję użycia
	Wyrób medyczny
	Producent
	Dystrybutor
	Termin ważności
	Numer serii
	Produkt jałowy, sterylizowany z zachowaniem zasad aseptyki
	Zastosowanie wielokrotne u jednego pacjenta
	Nie używać produktów uszkodzonych ani przekłutych.
	Uwaga, patrz Instrukcja użycia (zawierająca ważne ostrzeżenia/środki ostrożności)
	Znak CE z numerem Jednostki Notyfikowanej