

MASTRELLE®

MADAME 45+



Dispozitiv medical 

PREVINE ȘI TRATEAZĂ USCĂCIUNEA ȘI IRTAȚIA VAGINALĂ CAUZATĂ DE DEFICITUL DE ESTROGENI LA MENOPAUZĂ

- ✓ Asigură o bună lubrifiere
- ✓ Combate durerile din timpul actului sexual, iritația, uscăciunea, inflamația și sensibilitatea locală

Tratează și previne uscăciunea vaginală, pruritul, iritația și senzația de disconfort din timpul actului sexual cauzate de deficitul de estrogeni și reechilibrează pH-ul vaginal.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza Mastrelle® Madame gel vaginal, chiar dacă ați mai utilizat acest dispozitiv medical. Este posibil ca aceste informații să se fi modificat conform ultimelor cercetări sau descoperiri care au apărut de la ultima utilizare.

Acest dispozitiv medical poate fi eliberat fără prescripție medicală. Cu toate acestea este necesar să utilizați Mastrelle® Madame gel vaginal cu atenție pentru a obține cele mai bune rezultate. Păstrați aceste instrucțiuni. Se poate să fie necesar să le recitiți.

Informații despre produs

În mod normal, epiteliul vaginal este delicat și elastic datorită unui mecanism fin echilibrat ce menține nivelul fiziologic de hidratare și lubrifiere.

În apropierea menopauzei secreția hormonală scade. Impregnarea cu estrogen a mucoasei vaginale scade de asemenea, provocând atrofia țesuturilor vulvovaginale combinată cu o pierdere a hidratării și lubrifierii.


Uscăciunea vaginală se manifestă prin durere, iritație și prin disconfort în timpul actului sexual. În astfel de cazuri, se recomandă utilizarea locală de produse care favorizează hidratarea mucoasei vaginale și ajută la restabilirea elasticității și texturii normale.

Mastrelle® Madame gel vaginal cu isoflavone din soia și acid hialuronic asigură rehidratarea stratului superior al mucoasei vaginale. Aplicarea gelului vaginal **Mastrelle® Madame** ajută la formarea unui film protector, rehidratează, asigură o bună lubrifiere și îmbunătățește calitatea țesutului vaginal. Acțiunea sa trofică se datorează extractului de soia concentrat și standardizat în isoflavone 40% și acidului hialuronic încorporate într-un gel-cremă cu textură ușoară, negrasă, sub forma unei emulsii ulei în apă. pH-ul emulsiei este apropiat de cel fiziologic pentru mucoasa vaginală (pH 5). Astfel hidratată, mucoasa vaginală își reface suplețea și elasticitatea. **Mastrelle® Madame gel vaginal** este foarte bine tolerat și are avantajul de a fi în totalitate sigur.


Indicații

Mastrelle® Madame gel vaginal este eficient în hidratarea și lubrifierea mucoasei vaginale, restabilirea elasticității normale, precum și în tratamentul și prevenția uscăciunii vaginale datorate deficitului fiziologic de estrogeni din timpul premenopauzei, menopauzei și postmenopauzei, sau deficitului indus de estrogeni ce apare posthisterectomie (totală sau parțială) sau în timpul folosirii de contraceptive. Ajută în procesul natural de vindecare a microleziunilor induse prin fricțiune de la nivelul mucoasei vaginale.


Cum se folosește

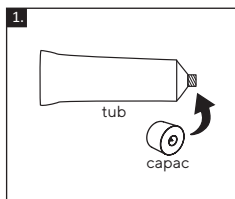


1. Desfiletați capacul și desigilați tubul cu partea ascuțită a capacului.

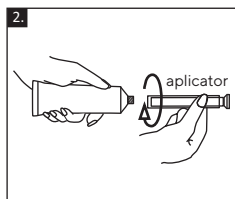


2. Înflețați bine aplicatorul vaginal pe filetul tubului.

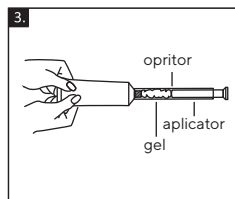


3. Presați tubul pentru a umple aplicatorul cu gel până ce pistonul se blochează în opritor.

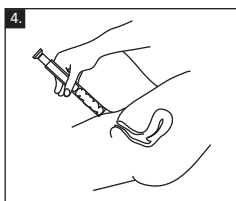

4. Desfiletați aplicatorul de pe tub și introduceți-l în vagin în poziția șezândă sau culcată pe spate.

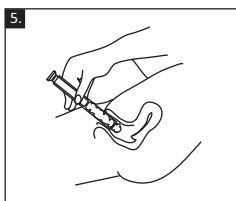

5. Apăsați pistonul aplicatorului până la maxim eliberând întreaga cantitate de gel în vagin.

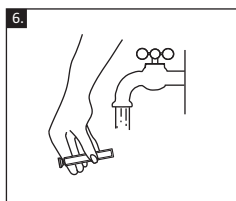

6. După folosire spălați cu apă caldă și dezinfecțați aplicatorul.

7. Este recomandat înainte de introducerea în vagin să scoateți o mică cantitate de gel din aplicator înainte de folosire, pentru a lubrifia vârful aplicatorului.

Când se folosește

Frecvența de aplicare depinde de intensitatea uscăciunii vaginale. Se recomandă o aplicare la 3-4 zile, dacă medicul nu prescrie altfel.

Reacții adverse

Până în prezent nu au fost raportate reacții adverse la acest produs sau la produse similare.

Efecte nedorite

Ca și în cazul utilizării altor produse pentru uscăciune vaginală, pot apărea eliminări albicioase, fără miros, reduse cantitativ.

Sarcină și alăptare

Mastrelle® Madame gel vaginal nu se recomandă a fi administrat în timpul sarcinii sau alăptării deoarece efectul său s-ar putea adăuga peste efectul estrogenic fiziologic din această perioadă.

Contraindicații

Sarcină, alăptare sau hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

Atenționări și precauții

⚠ În cazuri de infecții vaginale, consultați medicul înainte de a folosi acest produs.

Acest produs poate fi folosit în timpul menstruației și nu influențează rezultatele testelor ginecologice. Acest produs este compatibil cu utilizarea prezervativelor din latex lubrificate/nelubrificate, sau din poliuretan lubrificate.

Nu utilizați împreună cu dezinfectante cu săruri cuaternare de amoniu precum clorura de benzalconiu deoarece acidul hialuronic precipită în prezentelor.

Nu utilizați produsul în caz de hipersensibilitate cunoscută la soia, acid hialuronic, găbenele, aloe sau oricare alt ingredient din această formulă.

Dacă ambalajul prezintă deteriorări ce compromit integritatea tubului, nu folosiți acest produs.

Nu aruncați ambalajul gol în mediul înconjurător.

Nu lăsați la îndemâna copiilor.

🧊 Păstrați la temperaturi sub 25°C în ambalajul original.

Compoziție

Extract de boabe de soia (*Glycine max*) standardizat în isoflavone 40%, hialuronat de sodiu, carbomer, trietanolamină, parafină lichidă, glicerină, extract glicolic de găbenele (*Calendula officinalis*), extract glicolic de aloe (*Aloe vera*), propilenglicol, metilparaben, etilparaben, fenoxietanol, etilhexilglicerină.

Conținutul ambalajului

Cutie de carton cu un tub de aluminiu cu 20 g gel sau 45 g gel și un aplicator vaginal.

Data expirării

⌚ A nu se utiliza după data expirării înscrisă pe ambalaj.

Clasa dispozitivului medical

Mastrelle® Madame gel vaginal este un dispozitiv medical de clasă I nesteril și fără funcție de măsurare conform clasificării date de Directiva Consiliului European pentru dispozitive medicale 93/42/EEC.

Data la care aceste instrucțiuni au fost revizuite: August 2022



Producător

LookAhead S.R.L.
Șos. Păcurari nr. 127
700544, Iași, România
Tel.: 0232/252800



	Atenționare		Producător
	Număr lot (serie)		Data de expirare
	Citiți instrucțiunile înainte de utilizare		Păstrați la temperaturi sub