



WÄRME-PFLASTER

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

SOS Wärme-Pflaster lindern mit ihrer angenehmen und gut verträglichen Wärme wirksam Schmerzen und entspannen die verkrampte und strapazierte Muskulatur.

Auch Gelenkschmerzen und Steifheit können durch die wohlthuende Wärmewirkung positiv beeinflusst werden.

Die flexiblen Wärme-Pflaster sind von weichem, hautfreundlichem Material umgeben und enthalten eine Mischung aus Aktivkohle und Eisenpulver, die sich bei Kontakt mit Sauerstoff erwärmt.

Die Pflaster können gezielt auf die schmerzenden Stellen aufgebracht werden und haften gut auf der Haut. Sie spenden mindestens 8 Stunden lang wohlthuende, sanfte, natürliche und gleichmäßige Wärme, ohne die Haut zu reizen. Nach der Anwendung lassen sich die Pflaster leicht wieder von der Haut abziehen. Die effektive Tiefenwärme dieses Wärme-Pflasters dauert 8 Stunden an. Nachdem der Schmerz gelindert ist, kann die Wirkung weitere 8 Stunden anhalten – für bis zu 16 Stunden Schmerzlinderung.

Die wohlthuende Wirkung von Wärme:

Wärme ist eine bewährte Methode bei Muskel- und Gelenkschmerzen.

Langzeit- und Tiefenwärme besitzt die Eigenschaft, verkrampte Muskeln zu entspannen. Auch bei Gelenksbeschwerden kann Wärme die Symptome, wie zum Beispiel Schmerzen und Steifheit, lindern.

Zweckbestimmung:

Zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen

Applikationsort:

Rücken und Schulterbereich

Anwendung:

- Das Wärme-Pflaster wird von der Luft aktiviert. Das Sachet sollte daher erst geöffnet werden, wenn das Wärme-Pflaster benutzt werden soll.
- Die Haut an der Anwendungsstelle muss trocken und sauber sein.
- Das Sachet mit der Hand öffnen (nicht einschneiden) und das Wärme-Pflaster entnehmen.
- Die Schutzfolie von der Rückseite des Wärme-Pflasters abziehen und das Wärme-Pflaster mit der Klebseite auf die Haut über der schmerzenden Stelle aufbringen.

- Für eine optimale Haftung drücken Sie das Pflaster am gewünschten Applikationsort fest an, insbesondere an allen Ecken und Seiten.
- Nach dem Öffnen des Beutels wird das Wärme-pflaster innerhalb von 1 Minute aktiviert und erwärmt sich innerhalb von 5 Minuten.
- Nach dem Gebrauch das Wärme-Pflaster langsam abziehen.

⚠ Warnhinweise:

Bei falscher Anwendung können Wärme-Pflaster auch bei niedriger Temperatur zu Brandwunden führen.

Folgen Sie daher den Hinweisen zur Anwendung und überwachen Sie den Anwendungsbe-reich regelmäßig. Damit kein Risiko der Bildung von Brandwunden entsteht: ermöglichen Sie eine Luft-zirkulation über dem Wärme-Pflaster und wenden Sie keinen Druck an, beispielsweise indem Sie auf dem Wärme-Pflaster liegen oder sitzen oder über dem Wärme-Pflaster enganliegende Kleidung tragen. Falls das Wärme-Pflaster unangenehm heiß wird oder sich ein Hautausschlag bildet, ist die Anwen-dung des Pflasters sofort zu beenden.

Die Anwendung dieses Wärme-Pflasters sollte bei Personen, die das Pflaster nicht selbständig ab-nehmen können, wie beispielsweise ältere oder behinderte Personen, nur mit einer sorgfältigen Überwachung erfolgen.

Verwenden Sie das Pflaster nicht an einer anderen Körperstelle außer dem Rücken und dem Schulter-bereich. Verwenden Sie das Pflaster nicht bei Men-struationsbeschwerden oder Reizdarmsyndrom. Bei empfindlicher oder reifer Haut kleben Sie das Pflaster auf die Kleidung.

Bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symp-tomen, suchen Sie einen Arzt auf.

Bitte wenden Sie sich vor Anwendung dieses Pro-duktes an Ihren Arzt oder Apotheker, falls Sie:

an schlechter Durchblutung oder einer Herzker-krankung, an Diabetes, an Nervenschäden oder einer Erkrankung der Sinnesfunktionen, an einer Haut-erkrankung, an Rheumatoïdarthritis leiden oder schwanger sind, um zu entscheiden, ob eine Wärme-therapie für Sie angemessen ist.

⚠ SOS Wärme-Pflaster darf nicht angewendet werden:

bei Kindern im Alter bis zu 12 Jahren; während des Schlafs; bei Patienten mit einer Tendenz zu aller-gischen Hautreaktionen auf Medikamente oder Kosmetika; länger als 8 Stunden innerhalb eines



Lieber Kunde, wenn Sie dem QR-Code folgen, gelangen Sie zu einem Fragebogen zu dem von Ihnen gekauften Produkt. Über eine Teilnahme würden wir uns freuen.

Zeitraums von 24 Stunden; an einer Stelle, an der Rötungen, Entzündungen, Hautrisse, Blutergüsse oder Hautreizungen vorhanden sind; an Körperstellen, an denen Wärme nicht wahrnehmbar ist; in Verbindung mit Cremes, einzureibenden Mitteln, Sprays oder Lotionen, die auf die Haut aufgetragen werden; in Verbindung mit bzw. in der Nähe von anderen Wärmequellen; bei bettlägerigen Patienten und Patienten mit einer Tendenz zur Bildung von Hautgeschwüren.

SOS Wärme-Pflaster darf nicht:

verbrannt, geknetet, zerschnitten, gefaltet, zerrissen, in der Mikrowelle erwärmt oder ein sonstiger Versuch unternommen werden, das Wärme-Pflaster wieder aufzuwärmen; mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

Bitte beachten Sie:

Die Wärme-Pflaster sind für den einmaligen Gebrauch und zur äußerlichen Anwendung vorgesehen. Es ist normal, nach der Abnahme des Wärme-Pflasters eine leichte Rötung der Haut zu beobachten. Falls die Haut nach einigen Stunden noch immer gerötet ist, sollte kein Wärme-Pflaster verwendet werden bis die Rötung vollständig abgeklungen ist.

Lagerung/Verfallsdatum:

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. An einem kühlen, trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern. Bis zu dem auf dem Sachet angegebenen Verfallsdatum aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: Eisen, Aktivkohle und Wasser.

Entsorgung:

Mit dem normalen Hausmüll entsorgen; das Wärme-Pflaster darf NICHT verbrannt werden.

Die Inhaltsstoffe können schädlich sein, wenn sie verschluckt werden oder in direkten Kontakt mit

der Haut oder den Augen gelangen:

beim Verschlucken der Inhaltsstoffe den Mund mit Wasser ausspülen. Bei direktem Kontakt der Inhaltsstoffe mit der Haut oder den Augen sofort mit Wasser ab- bzw. ausspülen. In beiden Fällen sollte unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt werden.

Inhalt:

2 Wärme-Pflaster zur Einmalanwendung



Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main

Ein Unternehmen der
Merz Lifecare Holding



MERZ
LIFECARE



Hersteller:

Dr. Kleine Pharma GmbH
Heidsieker Heide 114
33739 Bielefeld



Stand der Information: 2022.01

Bedeutung der Symbole auf Packung:



Hersteller



Chargenbezeichnung



Vertrieb



Verwendbar bis



Achtung!
Verweis auf
Warnhinweise
in Gebrauchsanweisung



Bitte Gebrauchs-
anweisung
beachten



Nicht wieder-
verwenden



Medizinprodukt

MN 252617

162_REV15/252617-06

Tipp:

Bei Muskelschmerzen und Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich oder im übrigen Rückenbereich empfehlen wir Ihnen auch die Produkte SOS Wärme-Umschlag und SOS Wärme-Gürtel. Sie sorgen dank ihrer flexiblen und individuellen Passform für optimale Bewegungsfreiheit und versorgen Sie für mindestens 8 Stunden mit therapeutischer Tiefenwärme.

